


■各部の名称

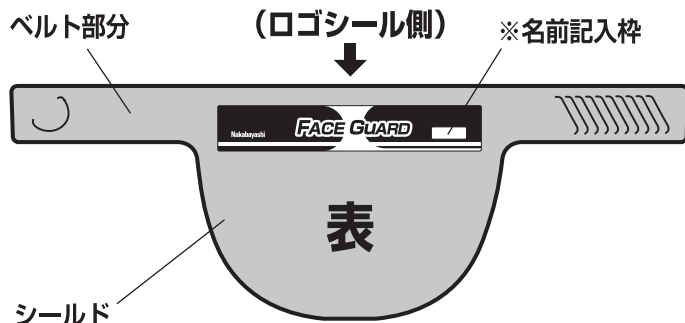


※組み立て前に名前を記入してください。




■サイズの調整方法

●ご注意：サイズの調整は頭部から外して行ってください。

- ① はじめに端から5番目のスリットにフックを引っかけます。

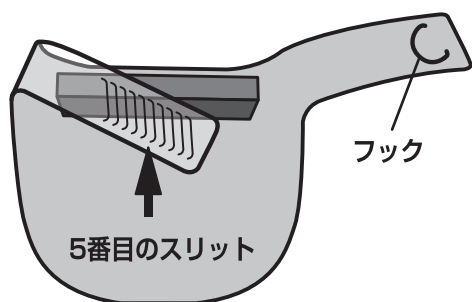


- ② フック側のベルトが上に重なるようにフックがけしてください。

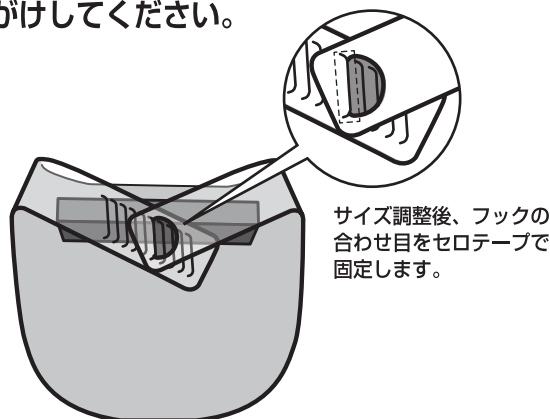

- ③ フックが外れないように片手でフック部を抑えながら (1) 後頭部側からかぶり (2) ツバ側を引き降ろしてクッション位置を決めます。

サイズが合わない場合はもう一度、頭から外してフックの位置を調整してください。

完成図

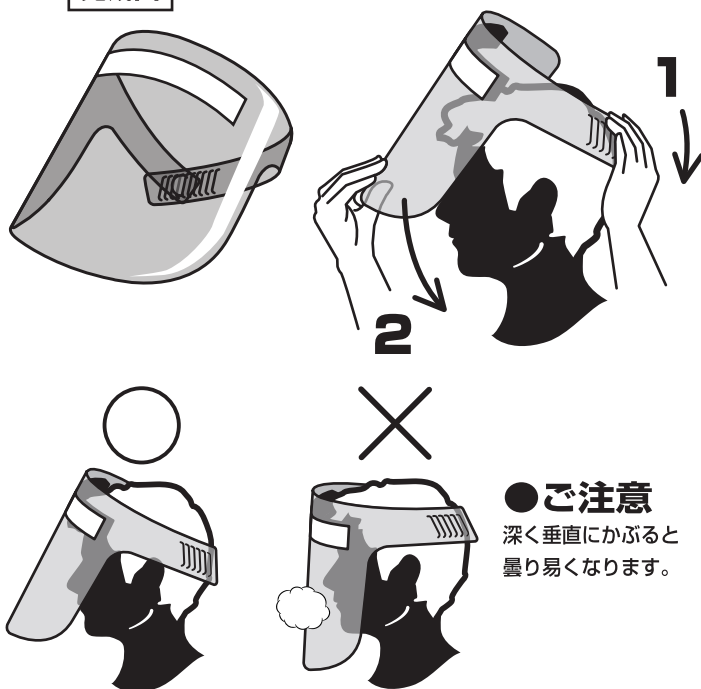

<ご注意> この説明書は捨てずに保管してください。

※ウイルス感染を完全に防止できる訳ではございません。あくまでも予防策としてご使用ください。

※マスクとの併用をお勧めいたします。

※アルコール消毒可。汚染の可能性を感じた場合は、使い捨てをお勧めいたします。

●材質：本体透明シート/PET・ヘッドパット/軟質ウレタンフォーム・表示シール/紙 ●製品重量：32g



4 902205 733133

品番 FU-NFG-E10

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間/土・日・祝日を除く
 TEL: 0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

コロナウイルスへの最前線でのご対応に感謝いたします。